

# Vorbereitung der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Packung zur Selbstanwendung

Aktuell befinden sich zwei verschiedene Packungs-Varianten mit unterschiedlichen Bestell-Nummern im Markt.

Überprüfen Sie bitte die Bestell-Nr. der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Packung. Sie finden diese auf der **linken Seite** der Packung (Roche order number).


## 1. Bestell-Nr. 09 417 125 003



Nasen-Abstrichtupfer und Gebrauchsanweisung für Patienten sind **direkt in der Antigen Test Packung enthalten**.

Sie können mit der Testvorbereitung nach Gebrauchsanweisung starten.


## 2. Bestell-Nr. 09 327 592 190

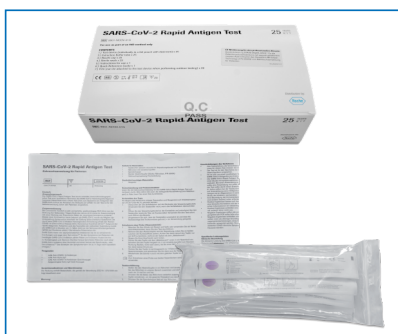

Nasen-Abstrichtupfer und Gebrauchsanweisung für Patienten **liegen der Antigen Test Packung separat bei**.

Bitte beachten Sie die **Anleitung** zur Vorbereitung der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Packung zur Selbstanwendung. Sie finden diese auf der **Rückseite** des Dokuments.

# Anleitung zur Vorbereitung der SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Packung zur Selbstanwendung (09 327 592 190)

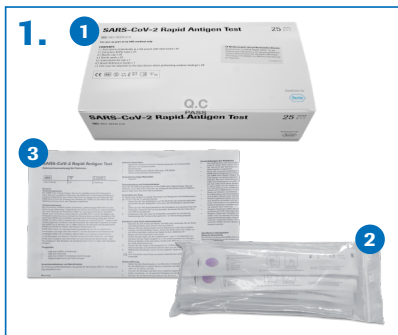

## 1. Überprüfen der Materialien

Stellen Sie sicher, dass Ihnen folgende Materialien vorliegen:

- ❶ Eine Packung mit 25 SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests und den dazugehörigen Verbrauchsmaterialien (Mat.-Nr. 09 327 592 190)
- ❷ Eine Tüte mit 25 Nasen-Abstrichtupfern (Nasal Swabs), separat beiliegend
- ❸ Eine Gebrauchsanweisung SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test (Gebrauchsanweisung für Patienten) (Mat.-Nr. 09 422 919 001), separat beiliegend



## 2. Öffnen der Packung und Entsorgen der folgenden Materialien

Öffnen Sie die Packung des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests und entsorgen Sie

- ❶ die Kurzanleitung (09 341 242 001),
- ❷ die Gebrauchsanweisung (09 327 789 001) und
- ❸ die beiliegenden Abstrichtupfer zum Nasen-Rachen-Abstrich\* zum SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test.



## 3. Aufnahme Nasen-Abstrichtupfer und Gebrauchsanweisung für Patienten

Legen Sie nun die separat erhaltenen Nasen-Abstrichtupfer sowie die separat erhaltene Gebrauchsanweisung (Mat.-Nr. 09 422 919 001) der Test-Packung bei.

Sie können nun mit der Testvorbereitung beginnen. Bitte lesen Sie hierzu sorgfältig die Gebrauchsanweisung für Patienten durch.