

KETOSURE™ POC

Handhabung

für den professionellen Einsatz

1



Starten Sie das Gerät durch Drücken der Ein/Aus-Taste (2 Sekunden).

Wählen Sie das Menüfeld «Bluttest» durch Betätigen der Pfeiltasten aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit «Enter».

2



Aktivieren Sie anschließend den Barcodescanner, indem Sie die Taste «Enter» gedrückt halten. Scannen Sie nacheinander die jeweiligen Barcodes (A) der Bediener ID, der Patienten ID und des Teststreifens. Bestätigen Sie jede Scannung mit «OK».

Um eine manuelle Eingabe durchzuführen, drücken Sie die Pfeiltaste nach unten, um die Displaytastatur aufzurufen (B). Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den gewünschten Zahlenfeldern und bestätigen Sie Ihre Eingabe abschließend mit «OK».

3




Nehmen Sie den Teststreifen aus seiner Verpackung. Führen Sie ihn in den vom Gerät vorgesehenen Steckplatz ein. Das Kontaktelement auf dem Teststreifen zeigt dabei nach oben (A). Die ID-Nummer und Daten des Patienten (sofern verfügbar) erscheinen anschließend auf dem Bildschirm (B). Drücken Sie «Enter», um die Eingaben zu bestätigen.

4




Warten Sie, bis das Blutropfen-Symbol auf dem Bildschirm erscheint (A). Anschließend kann die Probe aufgetragen werden: Berühren Sie mit dem Blutstropfen den vorderen Rand des Teststreifens (B). Der Teststreifen saugt die benötigten 0,8 µl Blut automatisch ein, bis ein Signalton zu hören ist. Das Gerät hat nun genug Testmaterial aufgenommen und startet automatisch einen Countdown (8 Sekunden).

5

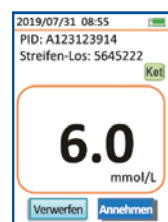


Nach 8 Sekunden erscheint das Ergebnis der Messung auf dem Bildschirm. Wählen Sie zum Speichern «Annehmen» oder «Verwerfen» für das Testergebnis. Entfernen Sie den benutzten Teststreifen durch Betätigen der Auswurf-taste oder Herausziehen des Teststreifens. Entsorgen Sie diesen gemäß den Vorschriften Ihres Hauses. Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät wieder abzuschalten.


Die wichtigsten Fehlermeldungen im Überblick

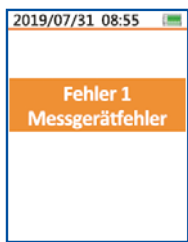


Während der Messung ist ein Fehler aufgetreten. Dies kann durch eine beschädigte elektronische Schaltung hervorgerufen werden. Starten Sie das Gerät neu. Erscheint die Fehlermeldung erneut, wenden Sie sich an das Kunden Service Center.

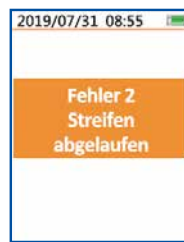


Das Haltbarkeitsdatum des Teststreifens ist abgelaufen. Entfernen Sie den Teststreifen und führen Sie eine erneute Messung mit einem neuen Teststreifen durch. Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum.

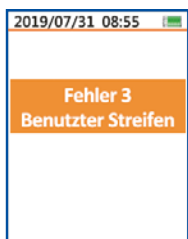


Der Teststreifen wurde bereits benutzt. Entfernen Sie den Teststreifen und führen Sie eine erneute Messung mit einem neuen Teststreifen durch.

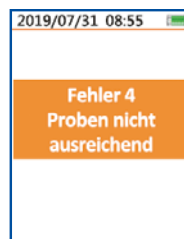

Die Blutprobenmenge reicht nicht aus, um einen Test durchzuführen. Entfernen Sie den Teststreifen und führen Sie eine erneute Messung mit einem neuen Teststreifen durch.

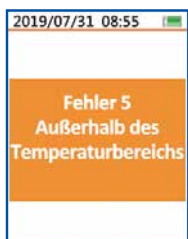


Die Umgebungstemperatur liegt nicht im zulässigen Bereich von 10 °C bis 40 °C. Gehen Sie in einen Raum mit einer Temperatur im angegebenen Bereich, warten Sie zehn bis fünfzehn Minuten und wiederholen Sie die Messung.

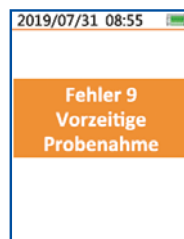


Die Blutprobe wurde zu früh aufgetragen. Entfernen Sie den Teststreifen und führen Sie eine erneute Messung mit einem neuen Teststreifen durch. Das Gerät zeigt ein Blutropfen-Symbol. Anschließend können Sie die Probe platzieren.



Die Chargennummer des Teststreifens ist ungültig. Wählen Sie eine neue Durchstechflasche mit Teststreifen und gültiger Chargennummer.

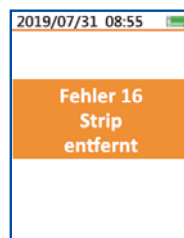

Der Teststreifen wurde während des Countdowns entfernt. Führen Sie eine erneute Messung mit einem neuen Teststreifen durch. Entfernen Sie den Teststreifen erst nach Ablauf des Countdowns (8 Sekunden).

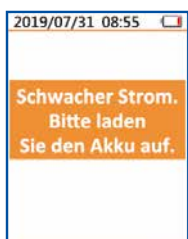

Der Akku des Messgerätes ist fast leer. Laden Sie den Akku durch Verwendung des USB Ladekabels auf oder platzieren Sie das Messgerät in der Basiseinheit. Während des Ladevorgangs können keine Tests durchgeführt werden.

Detaillierte Informationen zur Handhabung finden Sie in der Gebrauchsanweisung zum Ketosure™ POC System.



Ketosure™ POC System

Dies könnte Sie auch interessieren:



cobas® pulse System



navify® POC Operations

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

KETOSURE™ POC ist eine Marke von Apex Biotechnology Corporation

© 2025 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de/roche-point-of-care