

SARS-CoV-2

Экспресс-тест на антиген

Краткое руководство для пациентов

Данная инструкция служит помощью при использовании экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2. Обязательно прочтите инструкцию по применению перед использованием теста.

Остались вопросы?

Быстрый ответ на часто задаваемые вопросы можно найти на сайте www.roche.de/ag-patienten или обратитесь к фармацевту. Вы также можете позвонить в наш центр обслуживания клиентов по номеру 08002324820 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00).


Важная информация по безопасности

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!


- Перед выполнением теста вымойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук.
- Ватный тампон должен быть чистым. Не прикасайтесь к кончику тампона и убедитесь, что он не касается каких-либо поверхностей перед использованием.
- Убедитесь, что вы используете правильные прилагаемые тампоны для взятия пробы от производителя «Miraclean Technology» (правильный: P/N_93050; не использовать: P/N_96000).

Компоненты тестового набора


Тест-полоска

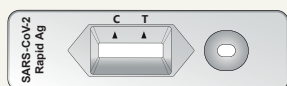


Пакет и влагопоглотитель

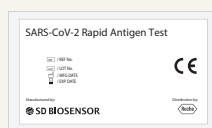

Пробирка для экстракции и дозирующий колпачок

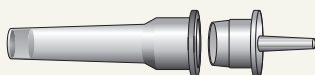

Стерильный тампон (произв.: Miraclean, P/N_93050)

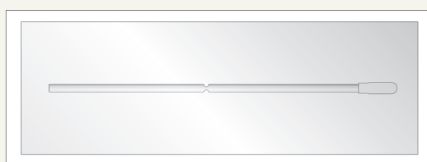


При выполнении теста разложите перед собой эти компоненты:



- Тест-полоска (индивидуально упакована с влагопоглотителем)
- Пробирка для экстракции
- Дозирующий колпачок
- Стерильный тампон (производства компании Miraclean)

Дополнительно вам понадобится:

- Таймер

1 Подготовка к тесту


1. Внимательно прочтите инструкцию для пациента к экспресс-тесту на антиген SARS-CoV-2.
2. Проверьте срок годности  на обратной стороне упаковочного пакета. Не используйте тест, если срок годности истек.
4. Убедитесь, что тест-полоска не повреждена, а индикатор состояния влагопоглотителя желтого цвета (= пригоден для использования).

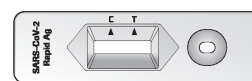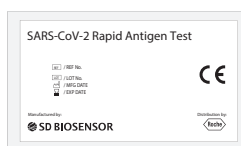

3. Откройте упаковочный пакет по линии отрыва и извлеките из него тест-полоску и пакет с влагопоглотителем.

2 Соберите и приготовьте образец мазка из носа

1. Вымойте руки с мылом и водой или используйте антисептик для рук, прежде чем начинать проводить тест.
2. Достаньте тампон из упаковки. Следите за тем, чтобы касаться тампона только за ручку, а не за ватный наконечник.
3. Слегка наклоните голову назад.
4. Вставьте тампон в ноздрю ватным наконечником вперед. Аккуратно введите тампон вовнутрь вперед, примерно на 2 см (параллельно нёбу - к горлу, а не вверх), пока не почувствуете сопротивление. Не надавливайте.
5. Проверните тампон 4 раза (общая длительность - примерно 15 секунд) по внутренней стороне носа, а затем извлеките его из носа.
6. Повторите шаги 4 и 5 с тем же тампоном в другой ноздре. Примечание: образцы из обеих ноздрей следует брать одним и тем же тампоном.

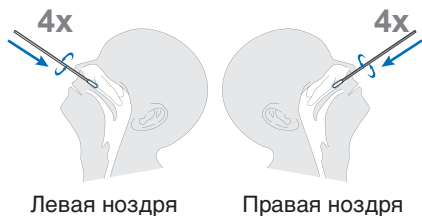


Левая ноздря

Правая ноздря

- Поместите тампон в пробирку с буфером для экстракции. Сожмите трубку в нижней части и проверните тампон вперед и назад, повторяя более 10 раз.
- Продолжайте сжимать стенки пробирки, вынимая тампон, чтобы выжать всю жидкость из тампона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если пробирку не сдавливать, то избыток буфера на тампоне может привести к получению неверных результатов.

- Плотно закройте пробирку дозирующим колпачком.

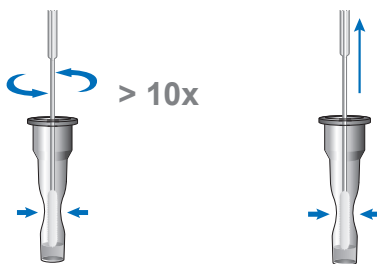


- Продолжайте **3 Проведение теста.**



3 Проведение теста

- Поместите тест-полоску на ровную поверхность.
- Держите пробирку вертикально над круглым отмеченным полем (не над прямоугольным окном результатов).
- Капните на поле ровно 4 капли. Для этого при необходимости аккуратно сожмите тьюбик.
Примечание: вы можете продолжать тест, если случайно нанесли 5 капель.

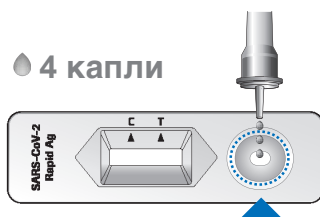


- Установите секундомер (таймер) и прочтите результат теста через 15 – 30 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если результат теста считать позже, чем через 30 минут, то результат может быть неверным.



4 Интерпретация результатов

Неверный результат

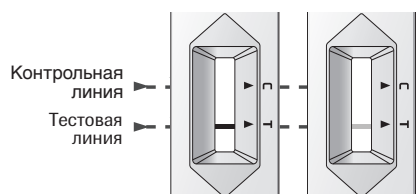


- Если контрольная линия (C) не видна, тогда результат считается недействительным.

Тест не сработал должным образом и вам следует выполнить новый тест с новым набором.

Смотрите очень внимательно: даже если контрольная линия слабая, тест следует считать действительным. Возможно, вы неправильно выполнили тест. Внимательно прочтите инструкцию по применению и повторите тест. Если результаты теста останутся недействительными, обратитесь к врачу или в центр тестирования на COVID-19.

Положительный результат

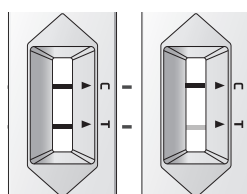


- Наличие тестовой линии (T) вместе с контрольной линией (C) означает положительный результат.

Смотрите очень внимательно: даже если тестовая линия слабая, тест должен быть оценен как положительный.

Положительный результат теста означает, что у вас очень высокая вероятность заражения COVID-19. Немедленно обратитесь к своему врачу / терапевту или в местный отдел здравоохранения и соблюдайте местные правила самоизоляции. При необходимости врач назначит подтверждающий тест с ПЦР.

Отрицательный результат

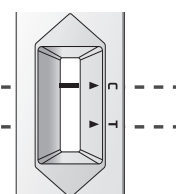

- Наличие контрольной линии (C) (независимо от того, насколько она слабая), но отсутствие тестовой линии (T) означает отрицательный результат. Маловероятно, что у вас COVID-19.

Даже при отрицательном результате следует продолжать соблюдение всех защитных и гигиенических мер.

В случае подозрения (т.е. если у вас стойкие симптомы или симптомы становятся более серьезными) рекомендуется повторить тест через 1 – 2 дня, поскольку коронавирус не может быть точно обнаружен на всех этапах инфекции. Если вы не уверены, обратитесь к своему терапевту или семейному врачу.